
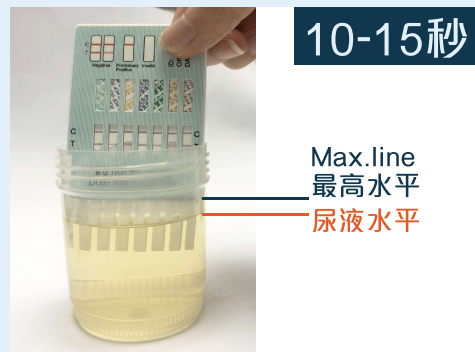


14項毒品快速測試(尿液)測試步驟

Test Procedures/Interpretation - One step Multi-Drug Urine Test Panel

內含：尿杯、測試包、說明書、教學步驟

測試需在室溫下進行
(10°C ~ 30°C)


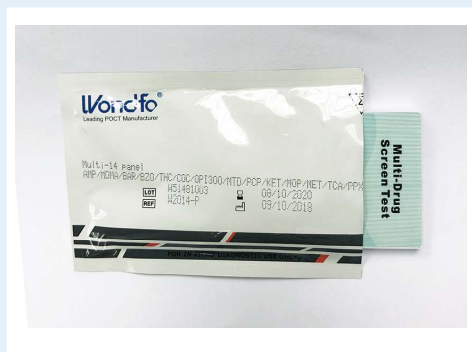


1 撕開密封包裝袋並將測試面板取出

2 握著測試面板一邊，將另一邊的蓋子拉出，以露出吸水測紙一端



3 將吸水紙一端浸入尿液樣本內維持十秒鐘，並確保尿液水平不超過面板上標示之最高水平

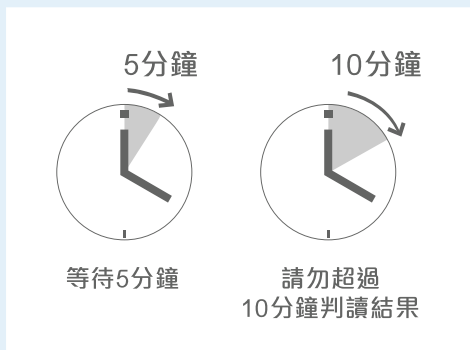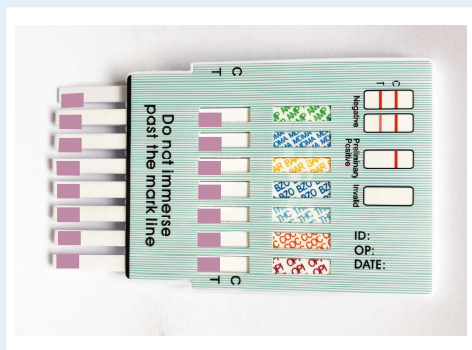

4 將測試面板平放在一個乾淨，乾爽及不吸水的表面

5 請等待五分鐘，五分鐘後請在光線良好的地方判讀結果；請勿超過十分鐘判讀結果


AMP	MTD
MDMA	PCP
BAR	KET
BZO	MOP
THC	MET
COC	TCA
OPI	PPX

檢驗結果解讀




陽性結果 (+)

玫瑰色線會出現於C區域(Control)上，而T區域(Test)則不會有任何顏色線。這個結果代表於特定的測試區內相關藥物呈陽性結果。

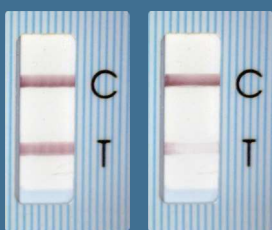

陰性結果 (-)

玫瑰色線會同時出現於C區域(Control)及T區域(Test)上。這結果代表尿液樣本所含之藥物濃度低於檢測限，結果為陰性。如有顏色線不全或色淺者均作有線論，同為陰性。

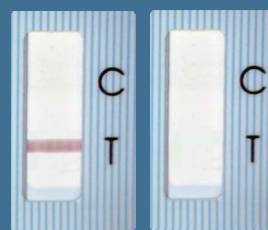

無效結果

如果C區域(Control)沒有顏色線，無論T區域(Test)上有否出現顏色線，測試均為無效，需要重做，直至結果有效，並記下無效產品的批號，以便跟進。

產品批號
LOT no. H51481003
REF H2014-P

如有任何疑問，請徵詢專業人士的意見


備註：顏色線的深淺或闊窄對測試沒有任何意義。

1. FDA approved on selected items, please refer to package insert for more information.



14項毒品快速測試(尿液) 測試 One step Multi-Drug Urine Test Panel

測試種類：安非他命、搖頭丸、巴比士酸鹽、苯二氮平類、大麻、可卡因、鴉片類、美沙酮、天使塵、氯胺酮/K仔、嗎啡、冰毒、三環抗抑鬱藥、丙氧芬

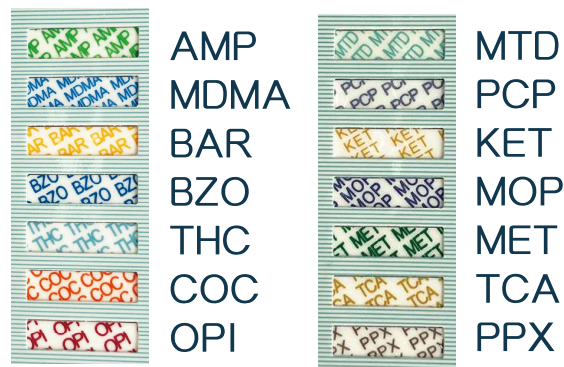

Appendix

Drug Adulteration	Drug name	中文名	Cut-off (ng/ml)
AMP	Amphetamine	安非他命	1000
BAR	Barbiturates	巴比士酸鹽	300
BZO	Benzodiazepines	苯二氮平類	300
COC	Cocaine	可卡因	300
THC	Marijuana	大麻	50
MTD	Methadone	美沙酮	300
MET	Methamphetamine	冰毒	1000
MDMA	MDMA	搖頭丸	500
MOP	Morphine	嗎啡	300
OPI	Opiate	鴉片類	300
PCP	Phencyclidine	天使塵	25
TCA	Tricyclic Antidepressant	三環抗抑鬱藥	1000
BUP	Buprenorphine	丁丙諾啡	10
OXY	Oxycodone	羥考酮	100
KET	Ketamine	氯胺酮/K仔	1000
PPX	Propoxyphene	丙氧芬	300
TAM	Tramadol	曲馬多	1000

Urine Adulteration	Parameters	中文名	Normal Range
CR	Creatinine	肌酐	20-200 mg/dl
pH	pH	酸鹼值	4-9
OX/PCC	Oxidants/Pyridinium Chlorochromate	氧化劑/氯鉻酸吡啶	--
NI	Nitrite	亞硝酸鹽	0-5 mg/dl
SG	Specific Gravity	尿比重	1.005-1.025

No responsibility is assumed by Hytex Medical, its licensors or associates, for any injury and/or damage to persons or property as a matter of products liability, negligence or otherwise, or from any use or operation of any methods, products, instructions, or ideas contained in the material herein. Because of rapid advances in the medical sciences, in particular, independent verification of diagnoses and drug dosages should be made.

如有任何疑問，請徵詢專業人士的意見

14項毒品快速測試(尿液) 測試 One step Multi-Drug Urine Test Panel	14項毒品快速測試(尿液) 測試 One step Multi-Drug Urine Test Panel	14項毒品快速測試(尿液) 測試 One step Multi-Drug Urine Test Panel
內含：尿杯、測試包、說明書、教學步驟	內含：尿杯、測試包、說明書、教學步驟	內含：尿杯、測試包、說明書、教學步驟
測試種類：安非他命、搖頭丸、巴比士酸鹽、苯二氮平類、大麻、可卡因、鴉片類、美沙酮、天使塵、氯胺酮/K仔、嗎啡、冰毒、三環抗抑鬱藥、丙氧芬	測試種類：安非他命、搖頭丸、巴比士酸鹽、苯二氮平類、大麻、可卡因、鴉片類、美沙酮、天使塵、氯胺酮/K仔、嗎啡、冰毒、三環抗抑鬱藥、丙氧芬	測試種類：安非他命、搖頭丸、巴比士酸鹽、苯二氮平類、大麻、可卡因、鴉片類、美沙酮、天使塵、氯胺酮/K仔、嗎啡、冰毒、三環抗抑鬱藥、丙氧芬